



Komet **EnDrive.**

State-of-the-Art-Motor.

Entwickelt für Ihre Bedürfnisse.



reddot winner 2025
innovative design




Inhalt.

4		5	Komet EnDrive.
6		7	Wirtschaftliche Praxis.
8		9	Einfacher Einsatz.
10		11	Smarte Sicherheit.
12		13	Gemacht für Ihren Workflow. State-of-the-art-Design.
14		15	Optimieren Sie das Optimum.
16		17	Einzelnen herausragend. Im Team noch besser.
18		19	Entwickelt für Ihren Bedarf.

Komet **EnDrive**.

Bringen Sie Ihre Praxis nach vorn – wirtschaftlich, einfach, sicher.

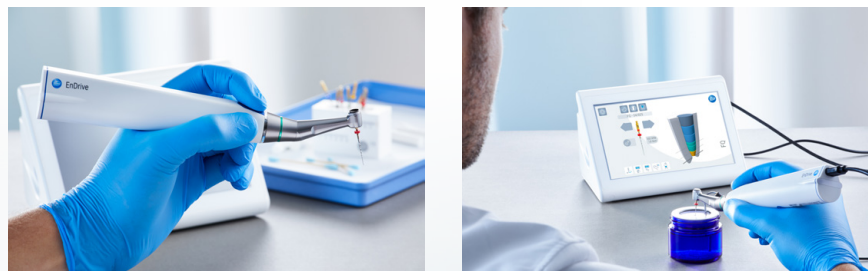

Unser neuer, batteriebetriebener Endo-Motor mit integriertem Apexlokator wurde speziell für heutige Anforderungen und Bedürfnisse in der zahnmedizinischen Praxis entwickelt. Dadurch macht er Ihre tägliche Arbeit wirtschaftlich, einfach und sicher.



Wirtschaftlich:

Der EnDrive hilft, durch effiziente Prozesse Zeit, Aufwände und Kosten zu sparen – eine Investition, die sich mit jedem neuen Praxistag auszahlt.




Einfach:

Er erleichtert Ihnen durch intuitive Bedienbarkeit und höchste Flexibilität die Arbeit. In der Regel beherrschen Sie die Technik schon nach kurzer Einarbeitung.



Sicher:

Unsere Fachberatung und viele neue Features minimieren Anwendungsfehler, Verzögerungen und Unterbrechungen.

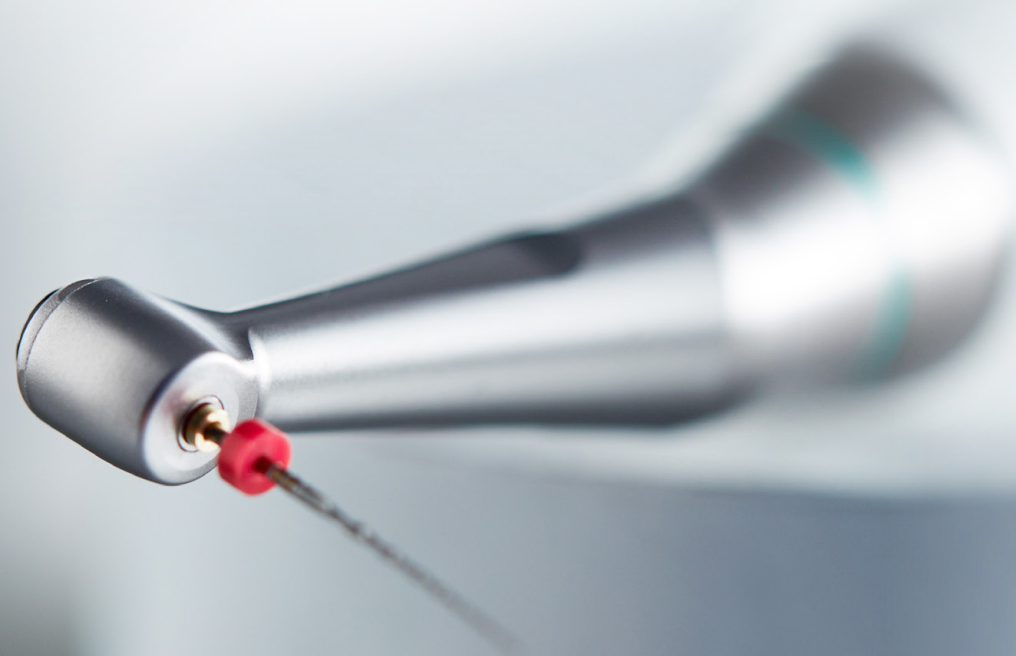

Wirtschaftliche Praxis.

EnDrive zahlt sich aus – mit jedem Praxistag.

Egal, wie viele Endos Sie machen, ganz gleich, wie Sie bisher gearbeitet haben und welche individuellen Anforderungen Sie mit einem Endo-Motor erfüllen müssen: Unser neuer Endo-Motor mit integriertem Apex-lokator zahlt sich mit jedem Praxistag aus.

Profitieren Sie von verbesserten Features, die Ihre Aufwände reduzieren. Finden Sie heraus, wie Sie mit den neuen Stärken des EnDrive Zeit sparen können. Aufwände und Behandlungsdauer summieren sich schließlich im Laufe vieler Praxistage zu Kosten, die Sie einsparen können.

Updates, um die Sie sich nicht kümmern müssen.

Sie brauchen keine Assistenz, um den EnDrive nutzen zu können. Sie brauchen nicht einmal mehr jemanden, der Ihren State-of-the-Art-Motor immer up-to-date hält. Um die nötigen Softwareupdates kümmert sich der EnDrive selbst, mit nur einem Knopfdruck. Er erledigt sie automatisch übers WLAN, einfach, schnell, ohne Hilfe. Nie mehr den Service rufen müssen, weil das Update hängt. Keine Angestellten mehr, die sich darum kümmern müssen. Waren nicht immer schon die besten Updates die, von denen man nichts mitbekommen hat, außer, dass sie erfolgreich waren?




Voller Fokus auf das, was zählt.

Was zählt, ist die Behandlung. Sorgen Sie sich nicht um ausreichend geladene Batterien oder bei der Behandlung störende Kabel. Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Arbeit. Haupteinheit und Handstück des EnDrive sind kabellos und akkubetrieben nutzbar. Eine Akkuladung ist für einen gewöhnlichen Praxistag ausreichend und in 1,5 bis 2,5 Stunden aufgefüllt. Falls nötig, können Sie die Akkus des EnDrive sogar während der Behandlung laden. Ihr EnDrive ist immer bereit, loszulegen, was Verzögerungen oder Zwangspausen deutlich reduziert.

Kleines Winkelstück, große Effizienz.

Sie denken und handeln vorausschauend, Ihr EnDrive auch. Durch seine integrierte Kalibrierungsfunktion ist die perfekte Drehmomentübertragung sichergestellt. Die Kalibrierung ist kurz, der Vorteil hält umso länger: Ihr EnDrive arbeitet stets mit optimaler Leistung. Zusätzlich ist das Winkelstück elektrisch isoliert. Auch das spart wertvolle Zeit. Durch die Isolation können Sie auf einen zusätzlichen Überzieher aus Silikon verzichten und komfortabel mögliche Fehlmessungen bei ungewolltem Kontakt im Mundraum vermeiden. Für mehr Effizienz, weniger Behandlungspausen und Unterbrechungen.

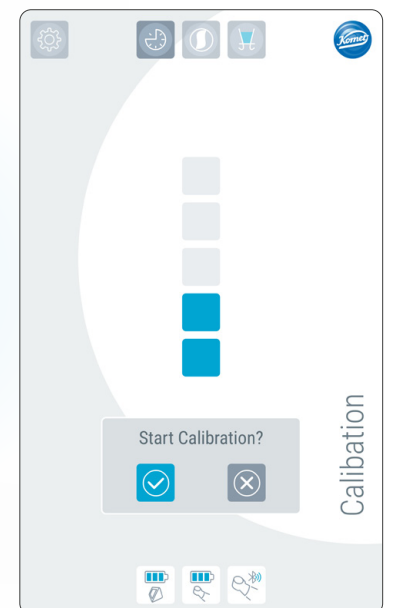


Einfacher Einsatz.

EnDrive macht Komplexes leicht.

Endos sind Gewohnheitssache. Also führen Sie Ihre Endos doch einfach aus, wie Sie es gewohnt sind. So einfach wie möglich, so komfortabel wie möglich. Der EnDrive wurde so konzipiert, dass Anwender genau so arbeiten können, wie sie es gewohnt sind – zusätzlich mit all den Vorteilen, die Technik auf dem neuesten Stand bietet. Endos sind komplex genug, machen Sie es sich mit Hilfe der heutigen technischen Möglichkeiten so einfach wie möglich. Ihr EnDrive passt nicht nur locker aufs Tray, sondern vor allem zu Ihren Wünschen und Anforderungen.

Nicht nur einfach, sondern intuitiv.

Mit dem EnDrive werden Sie ohne große Übung zum Meister. Die Menüstruktur wurde sorgfältig so konzipiert, dass selbst Ungeübte sich schon nach kürzester Einarbeitung zurechtfinden. Kein Grund also, zu zögern: wir begleiten Sie mit unserer qualifizierten Fachberatung so lange, wie Sie es wünschen und in jedem Fall, bis Sie sich absolut sicher fühlen. Die Vorzüge des intuitiv mit einem Fingertipp bedienbaren, klaren 7-Zoll-Farb- und Touchdisplays werden Sie langfristig zu schätzen wissen. Sie finden sich nicht nur schnell zurecht, sondern sehen aufgrund der klaren Struktur und Übersicht immer sofort und auf einen Blick alles, was Sie sehen müssen. Ihre Lieblingsfeilen, Sequenzen, Aufbereitungsfortschritt mit farblicher Tiefenmarkierung, Sie haben alle Infos auf einen Blick. Einstellen, umschalten – einfach durch einen Fingertipp. Gerade wenn es schnell gehen muss, ist das eine enorme Erleichterung und ein Zeitgewinn. Plus: Weniger Knöpfe für weniger Kontaminationsrisiko. Einfach einschalten, loslegen und nachhaltig profitieren.

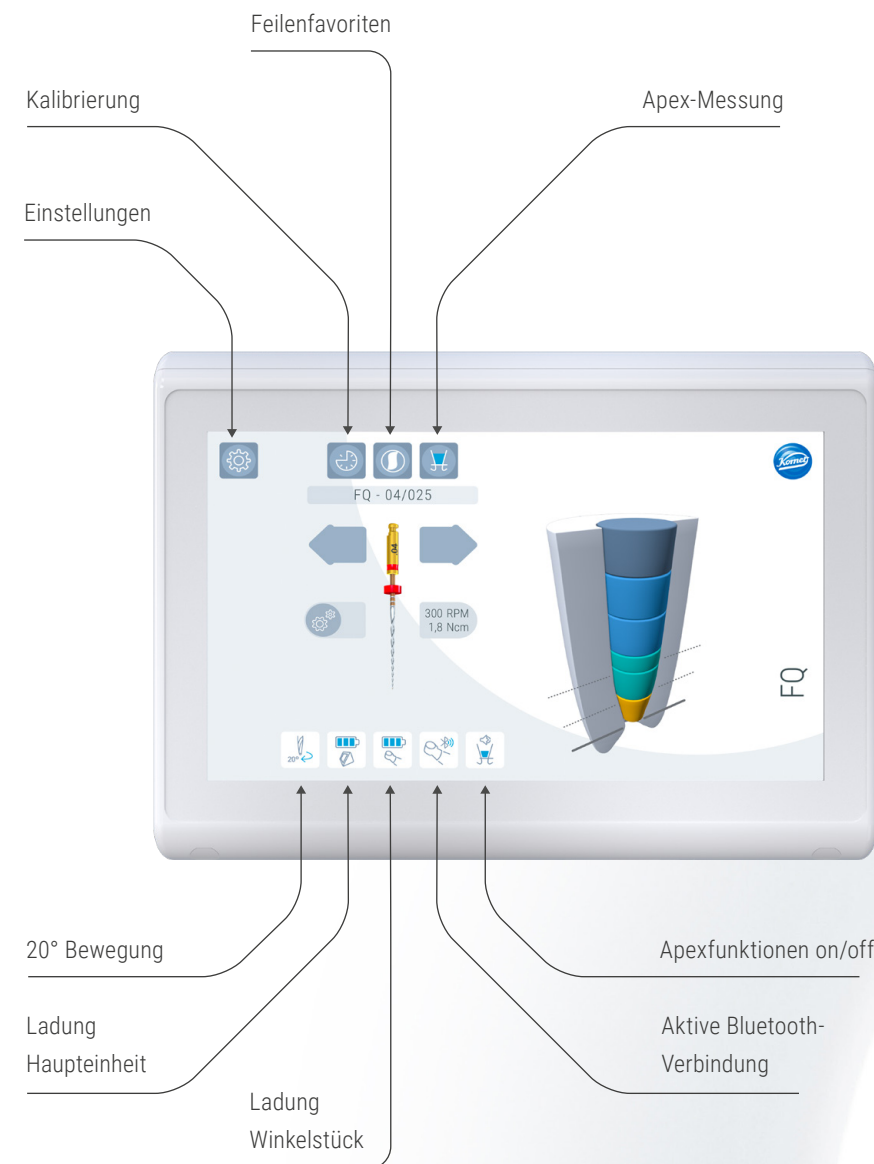

Effizienz ist Gewohnheitssache.

Jeder hat andere Vorlieben und Wünsche, was Endos angeht. Darum erfüllt der EnDrive sie nahezu alle. Sein ergonomisches Handstück ist für Rechts- wie Linkshänder ausgelegt, für filigrane Arbeiten und den mobilen Einsatz. Das Display lässt sich vertikal wie horizontal nutzen, so dass Sie es immer optimal ablesen können. „Rotierend“ oder „reziprierend“ ist keine Entscheidungsfrage mehr, sondern nur noch eine Frage der Gewohnheit. Der EnDrive beherrscht beides und folgt Ihren Wünschen. Mehr noch: In seiner umfassenden Feilenbibliothek sind nahezu alle auf dem Markt erhältlichen Endo-Feilen hinterlegt, inklusive Voreinstellungen wie Drehzahl oder Torquewert. Brauchen Sie Ihre alten Restbestände an Feilen einfach auf oder nutzen Sie weiter, was Sie lieben!

Kompakt, komfortabel, bei Bedarf kabellos.

Der EnDrive macht Ihnen keine Arbeit, damit Sie Ihre umso besser machen können. Durch seine kompakten Maße, den Einsatz sowohl im Hoch- als auch Querformat und das leichte Gewicht ist er flexibel einsetzbar und passt auf nahezu jedes Tray. Das ergonomische Handstück lässt sich komfortabel an den Magnethalter der Haupteinheit andocken, so können Sie die gesamte Technik mit einer Hand bequem in den nächsten Raum tragen. Genießen Sie völlige Freiheit bei der Arbeit – fast komplett ohne zuppelnde Kabel und zu viele Knöpfe, die gedrückt werden wollen.

Smarte Sicherheit.

Keine Abstriche bei der Sicherheit.

Vertrauen Sie bei Sicherheit nicht nur auf Ihr Gefühl, sondern auf Sicherheit à la Komet. Reduzieren Sie Feilenbrüche, Fehlmessungen und andere Verzögerungen so gut es mit dem neuesten Stand der Technik geht. Verringern Sie das Risiko von Kontaminationen, wo die Anforderungen an Hygiene besonders hoch sind. Minimieren Sie das Risiko von Überpräparationen, wo es auf Millimeter ankommt. Der EnDrive unterstützt Sie bestmöglich dabei.



Präzisionsarbeit, wie Sie sie sich wünschen.

Wer Höchstleistung bringen muss und Präzisionsarbeit abliefern will, braucht die besten Präzisionswerkzeuge. Vertrauen Sie auf die patentierte Apexlokalisierung, mit der Sie immer exakt wissen, woran Sie sind. Unser Apexlokator ist bereits in den EnDrive integriert und nimmt höchst präzise Messungen in Echtzeit vor, während Sie konzentriert weiterarbeiten. Sie haben jederzeit die genaueste Kontrolle über die Aufbereitungstiefe. Sie können sogar Ihre manuellen Feilen weiter benutzen. Verwenden Sie in dem Fall einfach die zugehörige Feilenklemme und das separate Kabel.



Optimale Arbeitsbedingungen dank kleinster Details.

Verbessern Sie Ihre Arbeitsbedingungen durch unsere verbesserten Endo-Features. So ist der Winkelstückkopf des EnDrive unser bislang kleinster und bietet beste Sicht auf den Arbeitsbereich. Nicht nur das, er ist auch 360 Grad drehbar, so dass Sie ihn in jeder Minute so einstellen können, wie es Ihren Haltevorlieben entspricht. Ganz neu ist die Magnethalterung der Haupteinheit. Dank Ihr können Sie Ihr Handstück blitzschnell am Motor befestigen, wenn es schnell gehen muss oder keine helfende Hand in der Nähe ist. Nebenbei wird das Risiko einer Kontamination verringert und Sie können die ganze Technik mit nur einer Hand transportieren.

Mit Sicherheit arbeiten, auch im Grenzbereich.

Jede Verzögerung summiert sich zu kostspieligen Zeitverlusten. Mit den Sicherheitsfeatures des EnDrive lassen sie sich auf ein Minimum reduzieren. Zusätzlich zur Anzeige auf der Haupteinheit sowie einem akustischen Signal leuchtet der neue LED-Ring des Handstücks auf, bevor Sie einen kritischen Torque-Wert erreichen. So können Sie im Grenzbereich präzise arbeiten und minimieren das Risiko eines Feilenbruchs. Reduzieren Sie erzwungene Behandlungspausen weiter durch die Auto-Stop- und Auto-Reverse-Funktion des EnDrive. Je nach Ihren Wünschen stoppt die Feile bei Bedarf oder dreht sich in entgegengesetzter Richtung wieder frei, bevor es zu einem Feilenbruch kommt – egal ob Sie rotierende oder reziprokierende Feilen einsetzen.

Gemacht für Ihren Workflow.





Von der Feilenauswahl bis zum Apex.

Immer die passende Feile.

Arbeiten Sie, wie es sich bewährt hat: Mit dem EnDrive haben Sie Ihre Lieblingsfeile einsatzbereit und mit den passenden Einstellungen auf dem Display, wenn Sie sie brauchen. Mit der My-File-Funktion können Sie bis zu drei eigene Feilensequenzen aus der umfassenden Feilendatenbank erstellen. Ihr EnDrive macht Sie startklar: Mit einem Fingertipp auf dem Touchscreen richten Sie Ihre vorgebogene Feile optimal für das Einbringen in den Kanal aus. Mit einem kurzen Tastendruck am Handstück wechseln Sie die Feile innerhalb einer Sequenz in Sekundenschnelle.

Sichere Auto-Funktionen.

Präzision bis auf den letzten Millimeter: Der EnDrive unterstützt Sie mit intelligenten Auto-Funktionen bei der Aufbereitung im Bereich des Apex. Je nach Einstellung stoppt bzw. pausiert Ihre Feile oder dreht entgegengesetzt, wenn Sie die Aufbereitungslänge erreicht haben. Sie brauchen Ruhe, um konzentriert arbeiten zu können? Deaktivieren Sie Apex-Sound und -Funktionen und konzentrieren Sie sich ganz auf die visuelle Darstellung und Ihren Patienten. Gewinnen Sie Zeit, Routine und Sicherheit!

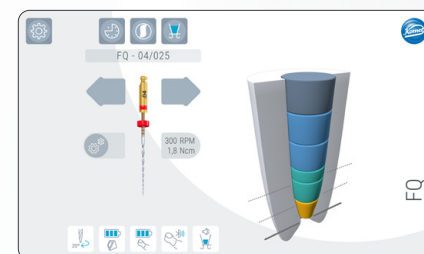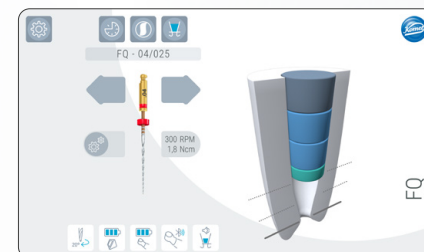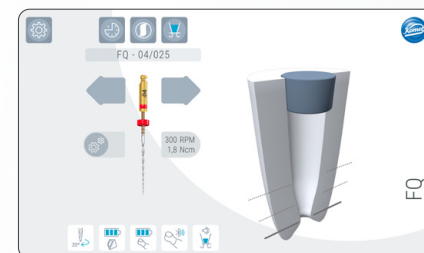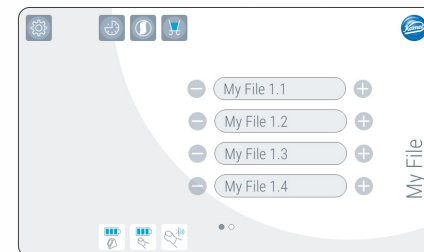

State of the Art.

Auch beim funktionellen Design.

Red Dot Design Award Winner.

Der Red Dot Design Award zählt zu den bedeutendsten Designwettbewerben der Welt. Kriterien für eine Auszeichnung sind Innovationskraft, Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Der EnDrive trägt die Auszeichnung des Red Dot Design Awards, weil sein Design eine klare Linie verfolgt – Ihnen die Arbeit leichter zu machen.

Konzentrieren Sie sich dank des klaren, intuitiv erfassbaren User Interfaces ganz auf Ihre Patienten. Minimieren Sie Risiken z. B. von Feilenbrüchen dank der durchdachten Features wie dem LED-Ring am Handstück. Nutzen Sie die Freiheiten, die Ihnen sein Design gibt: vertikale wie horizontale Nutzung, ergonomisches Handstück für filigranes Arbeiten als Links- wie Rechtshänder, nahezu kabellose Ausführung für mehr Komfort und den mobilen Einsatz in mehreren Räumen. Plus: Weniger Kontaminationsrisiko durch weniger Knöpfe.

Dank der gewohnt hochwertigen Verarbeitung von Komet ist Langlebigkeit gewährleistet. Überzeugen Sie sich von Design, das vollkommen der Funktionalität folgt, um Ihr Business noch weiter nach vorn zu bringen.



reddot winner 2025
innovative design

Optimieren Sie das Optimum.

Mit den passenden Feilen FQ und Procodile Q.

Nutzen Sie feinste Details, um die Vorteile Ihres EnDrive mit den richtigen Feilen noch weiter zu optimieren. Mit unserem rotierenden FQ-Feilensystem sowie unserem reziprozierenden Feilensystem Procodile Q ergänzen Sie Ihre Endo um einen weiteren Baustein von Komet, der Ihre Behandlungen einfach, wirtschaftlich und sicher macht.

Hohe Effizienz und Flexibilität.

Reduzieren Sie das Risiko eines möglichen Feilenbruchs noch weiter und steigern Sie Ihre Behandlungseffizienz bei gleichzeitig maximaler Sicherheit mit unseren Feilensystemen FQ und Procodile Q. Beide Feilen sind wärmebehandelt. Für Sie heißt das: Beide Systeme, ob rotierend oder reziprozierend, sind besonders flexibel, lassen sich leicht vorbeugen und tragen infiziertes Gewebe mit enormer Effizienz ab. Zusätzlich sind die Feilenkerne variabel getapert: Der Durchmesser nimmt zum Schaft hin ab, bei außen gleichbleibendem Taper.

Dadurch lässt sich jede Feile optimal Ihren individuellen Anforderungen anpassen und das Debris wird durch den großen Spanraum bestmöglich abtransportiert. Durch die Wärmebehandlung und den variablen Feilenkern folgen die Feilen auch stark gekrümmten Wurzelkanälen und erhöhen so die Sicherheit Ihres Behandlungserfolgs bei schwierigen anatomischen Voraussetzungen.

Einzelner herausragend. Im Team noch besser.

EnPack und EnFill – die ideale Ergänzung für wirtschaftliche, einfache und sichere Wurzelkanal-Obturationen.

EnPack.

Mit unserem Obturationsgerät für die warme, vertikale Obturation des apikalen Drittels schließen Sie Ihre Endo wirtschaftlich, komfortabel, sicher ab. Sie sind jederzeit einsatzbereit, können direkt loslegen und effizient ohne Unterbrechungen arbeiten. Die Heizspitze ist in nur 0,2 Sekunden aufgeheizt. Verlieren Sie während der Arbeit keine wertvolle Zeit und bleiben Sie im Workflow. Einfache Plug-and-Play-Bedienung, ein in jeder Haltung leicht ablesbares Display und ein leistungsstarker Akku stellen sicher, dass Sie sich nur um Ihren Patienten und nicht um die Technik kümmern müssen. EnPack macht sauberes, präzises Arbeiten besonders einfach. Dabei ist er universell einsetzbar, für Handaufbereiter wie im Zusammenspiel mit jedem Endo-Motor.

Die neun Heizspitzen bieten mit unterschiedlichen Durchmessern optimale Sicht auf den Arbeitsbereich, dank des geringen Gewichts und des ergonomischen Designs arbeiten Sie ermüdungsfrei und das präzise Abtrennen des Masterpoints ist mit der Heizspitze auch bei Obturation mittels Einstift-Technik komfortabel möglich – ohne Verschmieren und die Gefahr, die Guttapercha wieder herauszuziehen. Das schnelle Aufheizen im Wurzelkanal sorgt für größtmögliche Patientensicherheit und ein optimales, homogenes Ergebnis.



EnFill.

Unser Obturationsgerät für die warme, vertikale Obturation des mittleren und koronalen Drittels sorgt für den bestmöglichen Abschluss Ihrer Endo. Dank des leistungsstarken Akkus und der kurzen Heizzeit von nur rund 15 Sekunden sind Sie im Handumdrehen einsatzbereit und können Ihre Füllung ohne Unterbrechungen oder Verzögerungen durchführen. Die sechs verfügbaren Injektionsnadeln lassen sich dabei den Anforderungen des Wurzelkanals und Ihren Haltevorlieben optimal anpassen, da sie um 360° drehbar sind. Sie sind so dünn, dass Sie jederzeit opti-

male Sicht auf den Arbeitsbereich haben und den Kanal sicher und präzise abfüllen können. Intuitive Bedienbarkeit, schnelle Reaktionsfähigkeit und ermüdungsfreies Design sparen bei jeder Endo kostbare Zeit. Dabei ist der EnFill für Handaufbereiter wie als Partner für jeden Endo-Motor einsetzbar. Der leichte, ergonomische Handgriff gibt Ihnen volle Kontrolle über Füllmenge sowie Fließgeschwindigkeit und folgt dabei ganz Ihrem Workflow. Mit EnFill ernten Sie den Erfolg auch für all die herausfordernde Arbeit, die Sie zuvor mit Ihrer Aufbereitung des Wurzelkanals geleistet haben.



Entwickelt für Ihren Bedarf.

Das alles steckt im EnDrive.

Lieferumfang:

Jeder EnDrive ist mit allem ausgestattet, was Sie für eine erfolgreiche Wurzelkanalaufbereitung brauchen, z. B. mit Lippenclip und Feilenklemme für die Längenmessung mit mechanischen Feilen. Nicht im Lieferumfang, aber immer inklusive: unsere qualifizierte Fachberatung, die Sie begleitet, bis Sie absolut sicher sind. Der EnDrive wurde zuallererst entwickelt, um Ihre individuellen Anforderungen an Endos zu erfüllen. Darüber hinaus erfüllt er selbstverständlich alle wichtigen Anforderungen der gängigen Zertifizierungen sowie die üblichen Praxisvoraussetzungen.

	Lieferumfang
1	EnDrive Haupteinheit
2	EnDrive Handstück
3	EnDrive Winkelstück
4	EnDrive Feilenklemme
5	EnDrive Lippenclip
6	EnDrive Apexkabel
7	EnDrive Kabel Handstück
8	Ladekabel inkl. EU, UK, US, AU-Stecker
9	Pflegeadapter
	Beileger
	Gebrauchsanweisung

Ersatzteile und Zubehör:

Sie brauchen ein Ersatzteil oder wünschen ein zusätzliches Zubehörtel für Ihre Endo? Kein Problem. Mit unserem Service à la Komet erhalten Sie das Gewünschte umgehend – original und in bester Qualität.

REF	Ersatzteile/Zubehör
6	ED02 EnDrive Apexkabel
4	ED03 EnDrive Feilenklemme
5	ED04 EnDrive Lippenclip
3	ED05 EnDrive Winkelstück
2	ED06 EnDrive Kabel Handstück
8	ED07 EnDrive AC/DC Adapter



Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160, 32631 Lemgo · Germany
Telefon +49 (0) 5261 701-0
hello@kometdental.com
Contact for dealers:
export@kometdental.de

Verkauf Deutschland:

Telefon +49 (0) 5261 701-700
Telefax +49 (0) 5261 701-289
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-329
export@kometdental.de
www.kometdental.com

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15 · 5020 Salzburg
Telefon +43 (0) 662 829-434
Telefax +43 (0) 662 829-435
info@kometdental.at
www.kometdental.at

Komet France

18 rue · Fourcroy · 75017 Paris
Phone +33 (0) 1 43 48 89 90
info@komet.fr
www.komet.fr

Komet Italy

Via Gianbattista Morgagni 36,
37135 Verona
Phone +39 (0) 45 11171911
info@komet.it
www.komet.it

Komet UK

Invoice and general correspondence:
27 Old Gloucester St,
Holborn, London WC1N 3AX
info@kometuk.com
www.kometuk.com

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®,
CeraDrill®, CeraPost®, DC1®, DIAO®, EnDrive®, EnFill®,
EnPack®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, FQ®, H4MC®,
Komet BioSeal®, OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®,
PrepMarker®, Procodile®, Rocky®, SHAX® sind eingetragene
Marken der Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Die im Text genannten Produkte und Bezeichnungen sind
zum Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt.
Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des
Zeichens © darf nicht geschlossen werden, dass kein
rechtlicher Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte,
auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der
Vervielfältigung auch von Teilen daraus, sind vorbehalten.
Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung
des Herausgebers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm
oder ein anderes Verfahren), reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Produkt- und Farbänderungen sowie Druckfehler
vorbehalten.

Stand: August 2025